

# Tubifast®

## Elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband


Tubifast® 2-Way Stretch® hält Verbände sicher in Position, ohne einzuengen oder Druck auszuüben

Keine Sicherheitsnadeln oder Klebebänder zur Sicherung notwendig

Schnell und einfach in der Anwendung – zuschneiden und überstreifen für gleichmäßigen, bequemen Sitz

Schnelle und einfache Anwendung reduziert das Risiko von Verschmutzung

Geringeres Ausfransen und damit geringeres Risiko, dass Fasern in Wunden gelangen<sup>2</sup>

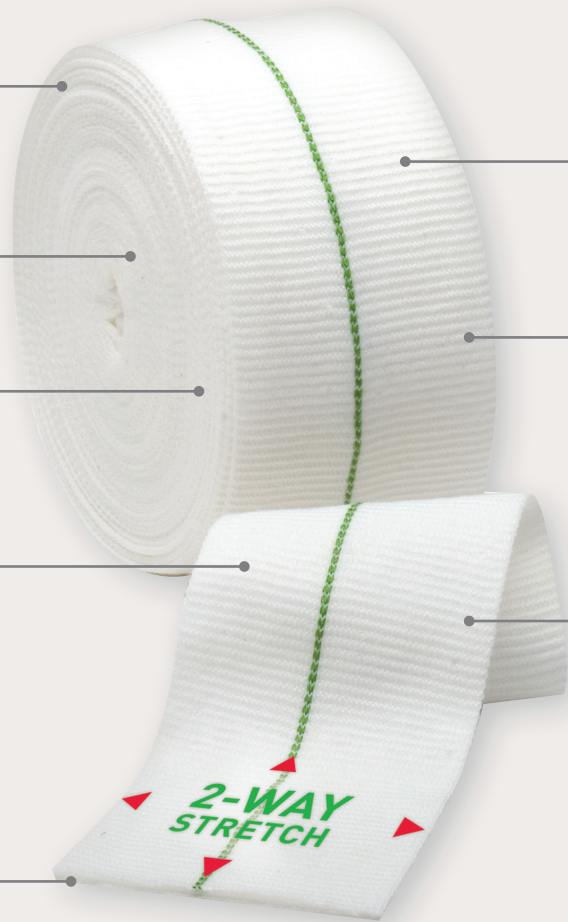

Auf gewünschte Länge zuschneidbar – ist kostengünstig und vermeidet Abfall


In fünf farbig markierten Breiten erhältlich – für gute Anpassung an alle Gliedmaßen unabhängig von Größe oder Form

Dehnfähigkeit in beide Richtungen von Tubifast® 2-Way Stretch® – für volle Bewegungsfreiheit und Komfort des Patienten<sup>1</sup>

WITH  
**2-WAY STRETCH**®  
TECHNOLOGY

- Längs- und Querdehnbarkeit für sichere Fixierung
- Gute Elastizität für ausreichende Bewegungsfreiheit

## Applikation

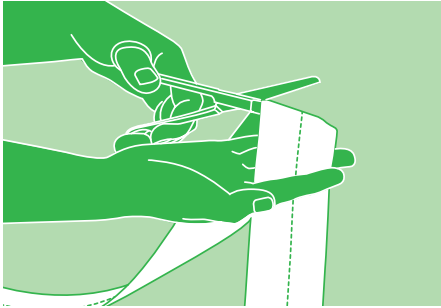

Wählen Sie die korrekte Breite anhand der farbigen Markierung und schneiden Sie die benötigte Länge ab.



Streifen Sie Tubifast® 2-Way Stretch® über den betreffenden Bereich.



Decken Sie den Verband mit Tubifast® 2-Way Stretch® ab. Für die Anwendung an komplizierteren Körperarealen stehen illustrierte Anleitungen zur Verfügung.

## So funktioniert Tubifast® 2-Way Stretch®

Tubifast® 2-Way Stretch® sichert Verbände, ohne einzuengen oder Kompression zu verursachen. Nadeln oder Klebebänder zur zusätzlichen Fixierung sind nicht notwendig. Die Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für volle Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Tragekomfort.

Tubifast® 2-Way Stretch® ist in fünf verschiedenen Breiten für gute Anpassung an Gliedmaßen aller Größen und Formen lieferbar.

Die einzelnen Größen sind durch eingewebte, farbige Fäden gekennzeichnet.

## Vorteile von Tubifast® 2-Way Stretch®

- Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für volle Bewegungsfreiheit und Komfort<sup>1</sup>
- Kostengünstiger Verbrauch mit minimalem Abfall
- Lieferbar in mehreren farbig markierten Größen zur Anpassung an Körperarealen jeder Größe – von kleinen Gliedmaßen bis hin zu erwachsenen Oberkörpern
- Geringeres Ausfransen sorgt für minimiertes Risiko von Fasern in der Wunde<sup>2</sup>

## Fasergehalt

Viskose, Elastan und Polyamid.

## Waschanleitung



## Anwendungsempfehlungen

Tubifast® 2-Way Stretch® kann zum Sichern von Verbänden, zum Abdecken von Hautpartien an beliebigen Körperarealen oder als Unterstrumpf verwendet werden.

Aufgrund seiner schlauchförmigen Ausführung eignet sich Tubifast® 2-Way Stretch® auch zum Sichern von Verbänden in schwierigen Bereichen, wie z.B. Amputationsstümpfen.

Tubifast® 2-Way Stretch® und das Verpackungsmaterial enthalten kein Latex.

Referenzen: 1. Veröffentlichte Daten weisen nach, dass Tubifast® 2-Way Stretch® die Mindestanforderungen an die Längsdehnung beim Sitzen, Bücken und Beugen übertrifft. Physikalische Tests von Textilien durch B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.  
2. Daten vorrätig

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.  
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Tubifast® und 2-Way Stretch® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

## Bestellinformationen

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	PZN/ Packung	PZN/ Stück
----------	--------	---------------------	-----------------	---------------

### Home Care & Klinik

#### 10 m Länge


24 34	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 26 91	---
24 36	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 16	---
24 38	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 39	---
24 40	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 27 45	---
24 44	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 27 68	---

### Home Care

#### 1 m Länge

24 80	Rot (3,5 cm)	9 - 18 cm	09 93 277 4	00 14 35 38
24 81	Grün (5 cm)	14 - 24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28
24 82	Blau (7,5 cm)	24 - 40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34
24 83	Gelb (10,75 cm)	35 - 64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40
24 79	Violett (20 cm)	64 - 130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57

Unsteril – 10m-Produkte auf Rolle, 1m-Produkte einzeln verpackt

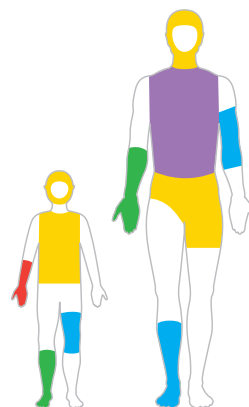

Größen- und Anwendungsübersicht